

Gebrauchsanweisung

GELASPON® STRIP

Steriler, resorbierbarer Gelatineschwamm zur Blutstillung und Wundversorgung.

4 cm x 1 cm x 1 cm

Inhaltsstoffe

100 mg Gelaspon® Strip enthalten 100 mg Gelatine (Schwein).

Beschreibung

Gelaspon® Strip ist ein steriler, resorbierbarer Gelatineschwamm. Seine feinporige Struktur aktiviert die Blutgerinnung. Er hat ein hohes Saugvermögen für Blut und Wundsekrete. Gelaspon® Strip hat einen neutralen pH-Wert und ist gut gewebeverträglich.

Als Wundauflage löst sich Gelaspon® Strip in 2-3 Tagen auf.

Zweckbestimmung

Gelaspon® Strip wird verwendet zur lokalen Blutstillung, zur Blutstillung bei leichtem bis mittelstarkem Nasenbluten, nach Zahnextraktionen, zur Wundversorgung oberflächlicher Wunden.

Anwendung

Gelaspon® Strip wird steril aus der Verpackung entnommen und trocken oder angefeuchtet verwendet. Dabei kann Gelaspon® Strip auf die Größe und Form der Wunde mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden. Zur Blutstillung bei Nasenbluten wird ein Streifen Gelaspon® Strip in das betroffene Nasenloch eingeführt. Dabei kann Gelaspon® Strip zum besseren Einführen leicht zusammengedrückt werden.

Nicht benötigtes Gelaspon® Strip darf, nachdem die sterile Verpackung geöffnet wurde, nicht mehr verwendet werden. Zur Versorgung trockener Wunden empfiehlt es sich, Gelaspon® Strip angefeuchtet, zur Versorgung feuchter Wunden trocken zu verwenden.

Zur Blutstillung sollte Gelaspon® Strip bis zum Stillstand der Blutung aufgelegt werden. Sollte es beim Nasenbluten auch nach Verwendung eines zweiten Streifens Gelaspon® Strip nicht zum Stillstand der Blutung kommen, ist ein Arzt aufzusuchen. Bei sezernierenden Wunden bildet Gelaspon® Strip ebenfalls ein Gel, wodurch ein schmerzloser, epithelschonender Verbandwechsel ermöglicht wird.

Anwendungsbeispiele:

Nasale Anwendung



- 1 - Entnehmen Sie den Gelaspon® Strip aus der Verpackung



- 2 - Geben Sie dem Strip eine konische Form.



- 3 - Führen Sie den Gelaspon® Strip in das betroffene Nasenloch ein.

Dermatologische Anwendung



- 1 - Entnehmen Sie den Gelaspon® Strip aus der Verpackung.



- 2 - Reinigen Sie die Wunde und legen Sie den Strip auf. Für einen besseren Halt kann der Strip mit einem Pflaster fixiert werden.

Anwendung nach Zahnextraktion



- 1 - Entnehmen Sie Gelaspon® Strip aus der Verpackung.



- 2 - Einlegen eines Strips von Gelaspon® Strip entsprechend der Größe der Wunde (Zuschnitt mit steriler Schere).

Hinweise zur Entnahme

Zuerst wird an der Perforation nach mehrmaligem Knicken ein einzelner Blister vom Blisterverbund abgetrennt. Der Einzelblister wird zwischen Daumen und Zeigefinger einer Hand festgehalten. Die Deckfolie wird nun mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand an der Aufreiblasche beginnend langsam abgezogen.

Lagerung

Gelaspon® Strip nicht über 30°C und trocken aufbewahren. Gelaspon® Strip sollte nach Öffnen des jeweiligen Einzelblisters sofort aufgebraucht werden. Das Verwendbarkeitsdatum (Sanduhrsymbol) dieser Packung ist auf der Faltschachtel und der Primärverpackung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach dem angegebenen Datum.

Gegenanzeigen:

- Gelaspon® 'Strip darf nicht verwendet werden bei bekannter Allergie gegen Schweinegelatine.
- Gelaspon® Strip sollte nicht verwendet werden bei infizierten Wunden bzw. Wundräumen mit eitründlichem Sekret.
- Bei chirurgischen Hautnähten sollte Gelaspon® Strip nicht aufgelegt werden, da der Heilungsvorgang der Hautränder beeinträchtigt werden kann.

Nebenwirkungen

Nebenwirkungen sind nicht bekannt.

Warnhinweise

- Nicht verwenden, wenn die Versiegelung beschädigt ist, da sonst keine Sterilität mehr gewährleistet ist.
- Gelaspon® Strip darf nicht nachsterilisiert werden. Nicht zur Wiederverwendung
- Es ist wichtig, die möglicherweise reduzierte Wirksamkeit von Gelaspon® Strip in Betracht zu ziehen beim Einsatz an Patienten, die mit Hemmstoffen der Gerinnung oder der Blutplättchen-Aggregation behandelt werden.
- Bei Kontakt mit Körperflüssigkeiten kann Gelaspon® Strip an Volumen zunehmen. Bedenken Sie daher den Kompressionseffekt auf die umgebenden anatomischen Strukturen, die möglicherweise empfindlich auf Kompression reagieren könnten.

Wichtig: Drücken Sie Gelaspon® Strip vor Gebrauch nicht zu stark zusammen und fügen Sie es nicht fest in Hohlräume ein.

Bei Säuglingen und Patienten mit Bewusstseinsstrübung sollte Gelaspon® Strip zur Blutstillung bei Nasenbluten nur nach Anweisung eines Arztes angewendet werden.



Das Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.



Hersteller:

AEGIS LIFESCIENCES PVT. LTD.

215/216, Mahagujarat Industrial Estate,
Phase - III, Gam: Moraiya, Po: Changodar,
Tal: Sanand, Dist: Ahmedabad - 382 213, India.
Web: www.aegis-lifesciences.com
E-mail: info@aegis-lifesciences.com
Ph.: +91 9726903131, +91 9727103131



Obelis s.a .

Bd. Général Wahis, 53

1030 Brussels, Belgium (www.obelis.net)

Vertreiber: Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH,
Brunsbütteler Damm 165 / 173, 13581 Berlin, Germany



Hersteller



Gebrauchsanweisung beachten



Oberer
Temperaturgrenzwert



Trocken aufbewahren



Nicht wiederverwenden



Nicht erneut sterilisieren



Bei beschädigter Verpackung
nicht verwenden



Verwendbar bis



Chargenbezeichnung



Sterilisiert durch Bestrahlung

AL/GSS/R1, 2020-03

®/™ sind Warenzeichen von Bausch & Lomb oder einer ihrer Tochtergesellschaften.

© Bausch & Lomb Incorporated

BAUSCH + LOMB



P1DE03

REF GS401010