

**Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch – sie enthält wichtige Informationen über die Anwendung des Produkts.**

# Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup> Gel

DR. WINZER

Liebe Anwenderin, lieber Anwender, mit Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup> Gel haben Sie sich für ein Produkt entschieden, das Ihre Augenoberfläche intensiv befeuchtet und beruhigt. Somit können subjektive Anzeichen einer Benetzungsstörung lang anhaltend gelindert werden. Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup> Gel eignet sich zur intensiven Befeuchtung des Auges. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Apotheker, Ihren Arzt oder gern auch an uns.

Dr. Winzer wünscht Ihnen und Ihren Augen alles Gute!

## **Zweckbestimmung:**

Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup> Gel ist ein Augenbefeuchtungsmittel

## **Anwendung:**

Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup> Gel verbessert intensiv die Befeuchtung der Augenoberfläche bei Trockenheitsgefühl, Brennen oder Müdigkeit der Augen, verursacht z. B. durch langes Fernsehen oder Bildschirmarbeit, Heizungsluft oder Klimaanlage.

## **Inhaltsstoffe:**

Jede 10 g Flasche enthält 0,2% Carbomer, Sorbitol, Natriumphosphat-Dodecahydrat, Natriumhydroxid, Wasser für Injektionszwecke und ist mit Cetrimid konserviert.

## **Wie oft sollten Sie Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup> Gel anwenden?**

Je nach Bedarf tropfen Sie 1-2 Geltropfen in jedes Auge. Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup> kann 3-5 mal täglich oder bei Bedarf häufiger angewendet werden.

## **Wie wenden Sie Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup> Gel an?**

Es wird empfohlen, vor der Anwendung von Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup> Gel die Hände zu waschen.

Drehen Sie die Schutzkappe ab. Neigen Sie den Kopf leicht nach hinten und halten Sie die Flasche senkrecht über Ihr Auge (ohne das Auge zu berühren) und ziehen Sie mit einem Finger der freien Hand Ihr unteres Augenlid vorsichtig nach unten. Drücken Sie die Flasche zusammen, um einen Tropfen in den unteren Bindehautsack einzutropfen.

Schließen Sie anschließend das Auge und bewegen Sie es leicht nach rechts und links, um den Tropfen gut auf der Augenoberfläche zu verteilen.

Wiederholen Sie, wenn nötig, den Vorgang für das zweite Auge und verschließen Sie die Flasche sorgfältig.



## **Gegenanzeigen:**

Bitte benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe überempfindlich reagieren.

## **Wichtige Informationen zur Anwendung von Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup> Gel:**

- Beim Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen (Irritationen, Unverträglichkeit) das Produkt nicht mehr anwenden.
- Bei anhaltenden Reizungen oder Irritationen brechen Sie die Anwendung ab und kontaktieren Sie Ihren Arzt.
- Sicherheitsinformation für Patienten mit schwerer Hornhautschädigung: In sehr seltenen Fällen wurde über Ablagerungen von Calciumphosphat auf der Hornhaut während der Behandlung mit phosphathaltigen Augenpräparaten berichtet.
- Vermeiden Sie eine Berührung der Tropfspitze mit Ihren Fingern, um mögliche Verunreinigungen der Lösung zu vermeiden.
- Berühren Sie das Auge nicht mit der Tropfspitze, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.

- Warten Sie ca. 15 Minuten, bevor Sie ein anderes Produkt am Auge anwenden.
- Setzen Sie Ihre Kontaktlinsen ab bevor Sie das Augengel anwenden. Sie können diese nach ca. 15 Minuten wieder einsetzen.
- Wenn es nach dem Eintropfen vorübergehend zu verschwommenem Sehen kommt führen Sie keine Kraftfahrzeuge oder bedienen Sie vorübergehend keine Maschinen.
- Verwenden Sie Lac®-Ophtal® Gel nicht mehr nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums.
- Jede Flasche sollte immer nur ein Anwender verwenden.
- Entsorgen Sie das Medizinprodukt 6 Wochen nach dem Öffnen.
- Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.

### Welche Packungen sind erhältlich?

Lac®-Ophtal® Gel gibt es in Packungen mit 10 g und 3 x 10 g Augengel.



Dr. Robert Winzer Pharma GmbH,  
Brunsbütteler Damm 165 - 173, D-13581 Berlin  
E-Mail: winzer@bausch.com



Sterilisiert durch Anwendung aseptischer Verfahrenstechniken



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.



Das Medizinprodukt 6 Wochen nach dem ersten Öffnen entsorgen.



Gebrauchsanweisung beachten



Verwendbar bis



Chargennummer

**Lac®-Ophtal® Gel, IFU-01, 2017-07**

83371PB291/2-DE P9DE01