

BOSTON® SIMPLUS™

Ein-Flaschen-Kombi-Lösung

Diese Packungsbeilage enthält wichtige Informationen. Lesen Sie sie bitte aufmerksam durch und bewahren Sie sie auf.

Speziell entwickelt für formstabile, sauerstoffdurchlässige Fluorsiliconacrylat- und Siliconacrylat-Kontaktlinsen.

Beschreibung und Anwendungshinweise: Boston® SIMPLUS™-Kombi-Lösung ist eine innovative Ein-Flaschen-Lösung zum Reinigen, Desinfizieren und Aufbewahren von formstabilen, sauerstoffdurchlässigen Kontaktlinsen. Sie ist für sauerstoffdurchlässige Fluorsiliconacrylat- und Siliconacrylat-Kontaktlinsen zugelassen. Boston® SIMPLUS™-Kombi-Lösung entfernt Proteine und Lipide von der Linsenoberfläche und hilft, hartnäckige Ablagerungen auf der Kontaktlinse zu vermeiden. Diese Lösung eignet sich gleichermaßen auch zum Abspülen von Kontaktlinsen, indem sie gelöste Ablagerungen von der Linsenoberfläche abspült. Ein Multi-Polymer-System erzeugt einen Flüssigkeitsfilm, ummantelt die Kontaktlinse beim Aufsetzen und trägt zu einer verbesserten gleichmäßigen Benetzung bei. Ein patentierter Wirkstoff erhält die Benetzbarkeit der Kontaktlinse aufrecht. Dieser Schritt erhöht den Tragekomfort für das Auge. Das in der Lösung enthaltene Konservierungssystem bekämpft nachweislich schädliche Organismen. Diese Lösung hat sowohl reinigende als auch desinfizierende Wirkung und ist gleichzeitig augenverträglich, wenn die Kontaktlinse aufgesetzt wird.

INHALT: Sterile, wässrige, gepufferte Lösung, enthält: Poloxamin, Hydroxyalkylphosphonat, Borsäure, Natriumborat, Natriumchlorid, Hydroxypropylmethylzellulose, Glucam sowie als Konservierungstoffe Chlorhexidinguconat (0,003%), Polyaminopropylbiguanid (0,0005%).

ANWENDUNG:

Entfernen Sie das Siegelband. Verwenden Sie die Lösung nur dann, wenn das Siegelband unbeschädigt und vor dem erstmaligen Öffnen vorhanden ist.

1. Um eine ausreichende Desinfektionswirkung zu gewährleisten, müssen Sie alle nachfolgend beschriebenen Schritte ausführen. Waschen Sie Ihre Hände mit einer milden Seife. (Achtung! Flüssigseife kann Suspensionsmittel auf Ölbasis enthalten.)
2. Legen Sie die Kontaktlinsen in einen leeren, von Ihrem Anpasser empfohlenen Aufbewahrungsbehälter und füllen Sie frische Boston® SIMPLUS™-Kombi-Lösung ein. Lassen Sie die Kontaktlinsen mindestens vier (4) Stunden bzw. über Nacht in der Lösung, bevor Sie sie wieder aufsetzen.
3. Am nächsten Morgen waschen Sie Ihre Hände gründlich mit einer milden Seife. Nehmen Sie die Kontaktlinsen nach der Einwirkzeit aus dem Aufbewahrungsbehälter. Um Verwechslungen zu vermeiden, beginnen Sie mit der rechten Kontaktlinse und reiben sie diese vorsichtig mit zwei (2) bis vier (4) Tropfen Boston® SIMPLUS™-Kombi-Lösung zwanzig (20) Sekunden lang ab. Um Beschädigungen zu vermeiden, legen Sie die Kontaktlinse am besten in Ihre Handfläche und kreisen Sie sanft mit dem Zeigefinger der anderen Hand über Vorder- und Rückfläche der Kontaktlinse. Separate Reinigungslösung ist nicht erforderlich.
4. Spülen Sie die Kontaktlinse ca. fünf (5) Sekunden lang in einem stetigen Fluss Boston® SIMPLUS™-Kombi-Lösung, um gelöste Oberflächenablagerungen zu entfernen (Hinweis: Abspülen mit Leitungswasser ist nicht mehr erforderlich), und setzen Sie anschließend die Kontaktlinse auf. Nun wiederholen Sie Schritt 3 und 4 mit der linken Kontaktlinse.
5. Reinigen Sie das Innere des Linsenaufbewahrungsbehälters nach jedem Gebrauch gründlich mit warmem Wasser, und trocknen Sie den Behälter anschließend offen an der Luft. Vorsichtsmaßnahme: Um Verschmutzung zu verhindern, vermeiden Sie jeden Kontakt der Flaschenspitze mit anderen Gegenständen. Halten Sie die nicht in Gebrauch befindliche Flasche dicht geschlossen.

WARN- UND VORSICHTSHINWEISE:

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie gegen irgendwelche seiner Bestandteile allergisch sind.
- Nicht für weiche (hydrophile) Kontaktlinsen geeignet.
- Befolgen Sie die Vorschriften Ihres Kontaktlinsenspezialisten zur Kontaktlinsenpflege. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann es zu ernsthaften Augeninfektionen kommen.
- Achten Sie darauf, dass die Spitze der Flasche nicht mit dem Auge in Berührung kommt, da hierdurch die Lösung verunreinigt oder das Auge verletzt werden kann.
- Waschen Sie grundsätzlich Ihre Hände, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen anfassen.
- Verwenden Sie keine Lösung mehrfach. Verwenden Sie grundsätzlich Ihre Lösung zum Reinigen und zum Desinfizieren der Kontaktlinsen.
- Halten Sie die Flasche vor und nach Gebrauch stets verschlossen, um Verunreinigungen oder Verdunstung zu vermeiden.
- Verwenden Sie Augenmedikamente in Verbindung mit dieser Lösung nur unter ärztlicher Aufsicht.
- Schütten Sie nicht verbrauchte Lösung 3 Monate nach dem erstmaligen Öffnen der Flasche weg.
- Nach dem Verfalldatum nicht mehr benutzen.
- FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN.
- Der Aufbewahrungsbehälter für Kontaktlinsen kann erhebliche mikrobielle Verunreinigungen enthalten, die zu Augenreizungen führen können. Zum Reinigen des Kontaktlinsenbehälters sollte dieser täglich mit der Pflegelösung gereinigt und danach mit warmem Wasser ausgespült und sodann offen an der Luft getrocknet werden. Der Kontaktlinsenbehälter sollte regelmässig ausgewechselt werden.

WICHTIG: Bei anhaltenden oder sich verschlimmernden Augenreizungen oder übermäßigem Tränenfluss oder bei Beeinträchtigung des Sehens verwenden Sie das Produkt nicht weiter, und suchen Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten auf!

 Bausch & Lomb Incorporated
Rochester NY 14609 USA

CE 0050

 Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road, Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK
Hergestellt in Italien

Bausch & Lomb, Boston und Boston Simplus sind Warenzeichen der Bausch & Lomb Incorporated.
© Bausch & Lomb Incorporated



154082597-01