

**SOFLENS® GEBRAUCHSANWEISUNG**

Dieses Merkblatt soll Anwender von hydrophilen, weichen SofLens®-Kontaktlinsen darüber informieren, was beim Tragen und der Pflege der Linsen zu beachten ist. Es gilt für:

PRODUKTNAME	MATERIAL	WASSERGEHALT	VERPACKUNGSÖSUNG
SofLens®59 (Hilafilcon B) leicht getönte Kontaktlinsen	Hilafilcon B	59% Gewichtsprozent	Boratgepufferte Kochsalzlösung
SofLens® 38 (Polymacon) leicht getönte Kontaktlinsen & SofLens®Multi-Focal (Polymacon) leicht getönte Kontaktlinsen	Polymacon	38,6% Gewichtsprozent	Phosphatgepufferte Kochsalzlösung
SofLens® Toric (Alphafilcon A) leicht getönte Kontaktlinsen	Alphafilcon A	66% Gewichtsprozent	Boratgepufferte Kochsalzlösung

**Beschreibung und Tragemodus**

Die SofLens® 59 und SofLens® Multi-Focal-Linsen eignen sich zum täglichen Tragen mit einem vom Kontaktlinsenspezialisten empfohlenen Austauschintervall.

Je nach Empfehlung des Kontaktlinsenspezialisten können SofLens® 38 und SofLens® Toric-Linsen im Daily Wear oder Extended Wear-Modus für 1-7 Tage getragen werden. Werden die Linsen wieder verwendet, müssen sie zwischen Absetzen und Wiederaufsetzen gereinigt, abgespült und desinfiziert werden. Halten Sie sich immer an die von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten empfohlenen Tragemodalitäten und Austauschintervalle. Die Linsen werden in sterilem Zustand ausgeliefert und wurden vom Hersteller für eine Wiederverwendung bis zu 30 Tage konzipiert. Sie wurden unter Dampf sterilisiert.

**Nicht verwenden**, wenn die Verpackung beschädigt oder geöffnet ist.

**Anleitung zum Aufsetzen und Absetzen**

Bevor Sie die Linsen berühren, waschen und trocknen Sie immer gründlich Ihre Hände, wobei Sie parfümierte Seife oder Seife mit medizinischen Zusätzen vermeiden sollten. Legen Sie die Linse auf Ihre Handfläche. Achten Sie darauf, dass die Linse mit der richtigen Seite nach außen zeigt.



Überprüfen Sie die Linse vor dem Aufsetzen auf mögliche Kratzer oder Beschädigungen. Achten Sie beim Absetzen der Linse darauf, dass Ihre Hände sauber und trocken sind. Schieben Sie die Linse mit dem Finger nach unten in den weißen Bereich des Auges und setzen Sie sie vom Auge ab. Verwenden Sie Benetzungstropfen, wenn sich die Linse nur schwer absetzen lässt.

**Linsenpflege**

- Die Reinigung und Desinfektion Ihrer Linsen zwischen den Anwendungen ist unerlässlich für gesunde Augen
- Verwenden Sie ausschließlich Pflegemittel für weiche Kontaktlinsen gemäß Anweisungen des Herstellers
- Verwenden Sie immer frische Linsenpflegelösungen, deren Ablaufdatum noch nicht erreicht ist
- Verwenden Sie keine anderen Lösungen, z.B. Leitungswasser, Mineralwasser oder Speichel, um die Linsen abzuspülen, aufzubewahren oder zu benetzen
- Halten Sie die Linsen immer vollständig in der empfohlenen Lösung eingetaucht, wenn Sie sie nicht tragen
- Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände oder Fingernägel, um die Linsen aus dem Behälter oder dem Auge zu nehmen
- Denken Sie immer daran, beim Reinigen der Linsen auch den Linsenbehälter zu reinigen
- Entsorgen Sie die Linsen stets nach dem von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten empfohlenen Tragezeitraum.

## Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Wenn Sie sich nicht an die von Ihrem Kontaktlinsen-spezialisten empfohlenen Tragezeiträume und Reinigungsverfahren halten, kann dies zu einem höheren Risiko für schwerwiegende Augeninfektionen führen. Tragen Sie Kontaktlinsen, die zum täglichen Tragen verordnet wurden, nicht beim Schlafen.

Tragen Sie keine Kontaktlinsen, wenn Sie unter folgenden Zuständen leiden:

- Allergie, Entzündung, Infektion oder Rötung im oder am Auge
- Trockene Augen (keine ausreichende Tränenflüssigkeit)
- Schlechter Gesundheitszustand, der sich auf die Augen auswirkt, z.B. Erkältung oder Grippe
- Systemische Erkrankung, die sich auf die Augen auswirkt.

Wenden Sie sich in folgenden Situationen vor dem Tragen von Kontaktlinsen an Ihren Kontaktlinsenspezialisten:

- Ausüben von Wassersport
- Aufenthalt in extrem trockenen oder staubigen Umgebungen
- Verwendung von Augenmedikamenten.

Wenn eines der folgenden Probleme bei Ihnen auftritt, nehmen Sie Ihre Linsen **sofort** aus dem Auge:

- Stechen, Brennen, Jucken, Reizung oder sonstige Schmerzen im Auge
- Verringerter Tragekomfort im Vergleich zu früherem Tragen
- Ungewöhnliche Sekretbildung oder übermäßiges Tränen der Augen
- Rötung der Augen
- Extrem oder anhaltend trockene Augen
- Eingeschränkte oder verschwommene Sicht
- Regenbögen oder Lichthöfe um Lichtquellen
- Lichtempfindlichkeit

Hält eines dieser Symptome auch nach dem Absetzen, Reinigen und Wiederaufsetzen der Linse oder dem Aufsetzen einer neuen Linse an, setzen Sie die Linse ab und **wenden Sie sich an Ihren Kontaktlinsenspezialisten**. Diese Symptome können zu schwerwiegenden Erkrankungen führen, wenn sie ignoriert werden.

Bausch & Lomb Incorporated  
Rochester, NY 14609, USA

Bausch & Lomb Incorporated  
106 London Road  
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

®/™ bezeichnen Warenzeichen von Bausch & Lomb Incorporated.  
© Bausch & Lomb Incorporated

Artikelnummer: SOFIFUDE